

aQuatens



## Aquatens – profesjonalna pielęgnacja okularów w domu

Aquatens jest wysokoefektywny  
i prosty w użyciu dzięki:

- odtłuszczającym, aktywnym substancjom myjącym (bezalkoholowym).
- będącej w zestawie ściereczce z mikrofazy którą usuwamy pozostałe po sputkaniu perełki wody - bez pocierania.
- zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego silikonowego aplikatora (CleanOn)

Dodatkowym atutem Aquatens jest jego niezwykle przyjemny zapach, oraz modny i elegancki design butelki i opakowania.



DYSTRYBUCJA W POLSCE LAZURYT  
50-994 WROCŁAW 60, SKR. POCZTOWA 110  
TEL.: 071 374 13 21 • FAKS: 071 374 13 22  
E-MAIL: [biuro@lazuryt.pl](mailto:biuro@lazuryt.pl)  
INTERNET: [www.aquatens.pl](http://www.aquatens.pl)  
WYPRODUKOWANO W NIEMCZECH

aQuatens

DO CODZIENNEJ  
PIELĘGNACJI OKULARÓW



## Skutecznie, dokładnie i komfortowo


Oddajemy w Państwa ręce ekskluzywny, najwyższej jakości, produkt do codziennej pielęgnacji szkielek okularowych mineralnych, organicznych i przeciwślonecznych. Aquatens jest innowacyjnym produktem, który powstał dzięki współpracy optyków i producentów środków czyszczących.

Aquatens służy do bezpiecznego i skutecznego czyszczenia okularów, ze szczególnym uwzględnieniem szkielek najwyższej jakości z powłokami uszlachetniającymi, np. z antyrefleksem. Aquatens znakomicie czyści i pielęgnuje okulary słoneczne!



#### Czyszczenie

Nanieść 1-2 krople płynu Aquatens na szkła z obu stron i dokładnie wyczyścić powierzchnię silikonowym aplikatorem.

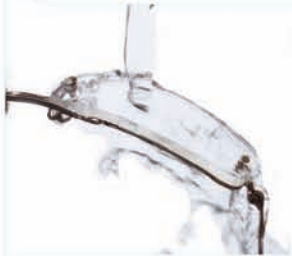

#### Splukiwanie

Wyczyszczone szkła należy optukać bieżącą wodą. Zmniejszając strumień wody, praktycznie osuszamy szkła.



#### Bez polerowania!

Pozostałe, niewielkie ilości wody usuwamy ściereczką, lekko dociskając. Nie polerujemy szkieł ściereczką.

## Zawsze czyste okulary

Dzięki higienicznie czystym okularom, Twoje oczy są bezpieczniejsze, a świat jest piękniejszy.

Jest wiele powodów dla których powinniśmy mieć zawsze krystalicznie czyste okulary. Po pierwsze dla zdrowia naszych oczu – brudne okulary to siedlisko bakterii – o infekcję nietrudno. Po drugie gorzej widzimy – mogą pojawić się bóle i zawroty głowy. Po trzecie brudne szkła szybciej się niszczą i wreszcie po czwarte brudne okulary są po prostu nieeleganckie!

Aquatens to idealne rozwiązanie. Czyści, chroni i dezynfekuje Twoje okulary.

## Super zestaw czyszczący

Do płynu Aquatens dołączona jest ściereczka o wymiarach 35 x 30 cm, ze 100 procentowej mikrofibry z zawieszoną. Służy ona do usunięcia pojedynczych kropli wody ze szkieł, pozostałych po płukaniu i ostatecznej kosmetyki oprawek.



Aquatens dostępny jest w butelkach o pojemności 75 ml z różową ściereczką i 50 ml z błękitną ściereczką.



## Silikonowy aplikator CleanOn

Aplikator płynu Aquatens został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić Państwu mycie szkieł. Specjalne wypustki umożliwiają dotarcie do zakamarków oprawki i skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. Silikon z którego został wykonany jest najwyższej jakości. Stopień elastyczności został dobrany tak, aby myć skutecznie i nie uszkadzać delikatnych powłok np. antyrefleksyjnych.